

ÜBERSICHT DER DOSIERUNGSEMPFEHLUNGEN

Behandlungsdauer, Abstände und Joule je Gerät und Anwendung

Über diese Übersicht

Dieses Dokument zeigt die empfohlene Behandlungsdauer je Gerät, abhängig von der Anwendung (oberflächlich oder tiefes Gewebe) und dem Abstand zur Haut. Für jede Kombination wird eine Mindest, optimale und Höchstdauer angegeben.

- Oberflächliche Anwendungen: Hautverbesserung, Hautbeschwerden, Augen oder Wunden.
- Tiefengewebe Anwendungen: Muskeln, Gelenke, Organe.
- Min: die kürzeste empfohlene Behandlungsdauer für eine sichere, spürbare Wirkung.
- Optimal: die empfohlene Behandlungsdauer für das beste Ergebnis.
- Max: die längste empfohlene Behandlungsdauer.

Unter jeder Tabelle finden Sie die Joule je Anwendung sowie die Behandlungsfläche des Geräts. Diese Werte gelten für alle Abstände innerhalb dieser Anwendung.

Bitte beachten Sie: Die unten stehenden Behandlungszeiten sind auf die nächste volle Minute gerundet, um sie praktisch und einfach anwendbar zu halten. Rotlichttherapie muss nicht sekundengenau erfolgen. Nutzen Sie diese Zeiten als klare Richtlinie, steigern Sie die Anwendung schrittweise und hören Sie auf Ihren Körper.

BioPhoton 2.0 / 3.0

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~3 Min	~13 Min	~23 Min
Tiefes Gewebe	0 cm	~15 Min	~32 Min	~50 Min
Tiefes Gewebe	15 cm	~23 Min	~50 Min	~77 Min

Joule: Oberflächlich 8.169 J | Tief 31.233 J | Behandlungsfläche: 961 cm²

BioPhoton Max Bi Tone

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~5 Min	~9 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~6 Min	~11 Min
Oberflächlich	40 cm	~2 Min	~7 Min	~12 Min
Oberflächlich	50 cm	~2 Min	~7 Min	~13 Min
Tiefes Gewebe	0 cm	~2 Min	~4 Min	~7 Min
Tiefes Gewebe	15 cm	~9 Min	~20 Min	~31 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~11 Min	~24 Min	~37 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~12 Min	~25 Min	~39 Min
Tiefes Gewebe	50 cm	~13 Min	~28 Min	~43 Min

Joule: Oberflächlich 20.196 J | Tief 77.220 J | Behandlungsfläche: 2376 cm²

Vivo Lux 450 S.2

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~2 Min	~3 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~2 Min	~4 Min
Oberflächlich	40 cm	~1 Min	~3 Min	~5 Min

Tiefes Gewebe	15 cm	~3 Min	~7 Min	~11 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~4 Min	~8 Min	~13 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~5 Min	~10 Min	~15 Min

Joule: Oberflächlich 35.700 J | Tief 136.500 J | Behandlungsfläche: 4200 cm²

Vivo Lux 300 S.2

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~2 Min	~3 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~2 Min	~4 Min
Oberflächlich	40 cm	~1 Min	~3 Min	~4 Min
Tiefes Gewebe	15 cm	~3 Min	~7 Min	~11 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~4 Min	~8 Min	~13 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~4 Min	~10 Min	~15 Min

Joule: Oberflächlich 23.460 J | Tief 89.700 J | Behandlungsfläche: 2760 cm²

Vivo Lux 150 S.2

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~2 Min	~3 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~2 Min	~4 Min
Oberflächlich	40 cm	~1 Min	~3 Min	~5 Min
Tiefes Gewebe	15 cm	~3 Min	~7 Min	~10 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~4 Min	~8 Min	~13 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~5 Min	~10 Min	~16 Min

Joule: Oberflächlich 12.240 J | Tief 46.800 J | Behandlungsfläche: 1440 cm²

Vivo Lux 60 S.2

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~2 Min	~4 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~4 Min	~7 Min
Oberflächlich	40 cm	~1 Min	~6 Min	~10 Min
Tiefes Gewebe	15 cm	~4 Min	~8 Min	~13 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~7 Min	~15 Min	~23 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~10 Min	~22 Min	~33 Min

Joule: Oberflächlich 5.177 J | Tief 19.793 J | Behandlungsfläche: 609 cm²

Vivo Lux 35 S.2

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	15 cm	~1 Min	~2 Min	~4 Min
Oberflächlich	30 cm	~1 Min	~5 Min	~8 Min
Oberflächlich	40 cm	~2 Min	~7 Min	~12 Min

Tiefes Gewebe	15 cm	~4 Min	~10 Min	~15 Min
Tiefes Gewebe	30 cm	~8 Min	~18 Min	~28 Min
Tiefes Gewebe	40 cm	~12 Min	~26 Min	~40 Min

Joule: Oberflächlich 2.125 J | Tief 8.125 J | Behandlungsfläche: 250 cm²

Vivo Red Light Cap 2.0

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	0 cm	~1 Min	~4 Min	~6 Min
Tiefes Gewebe	0 cm	~6 Min	~14 Min	~21 Min

Joule: Oberflächlich 3.009 J | Tief 11.505 J | Behandlungsfläche: 354 cm²

Vivo Torch 2.0

Anwendung	Abstand	Min	Optimal	Max
Oberflächlich	3 cm	~1 Min	~2 Min	~3 Min
Oberflächlich	20 cm	~2 Min	~8 Min	~14 Min
Tiefes Gewebe	0 cm	~2 Min	~4 Min	~6 Min
Tiefes Gewebe	3 cm	~3 Min	~7 Min	~10 Min
Tiefes Gewebe	20 cm	~14 Min	~29 Min	~45 Min

Joule: Oberflächlich 77 J | Tief 293 J | Behandlungsfläche: 9 cm²

Spezielle Anwendungen (Vivo Torch 2.0)

Beschwerde	Modus	Abstand	Aufsatz
Muskeln / Gelenke	Modus 2	0 cm	Mondlinse
Ohr / Zahn (Entzündung)	Modus 1	0 cm	Intraoral
Heuschnupfen / Nebenhöhlen	Modus 2	0 cm	Intraoral

Diese Einstellungen stammen aus dem Originalhandbuch und weichen von der allgemeinen Abstandstabelle oben ab.

Haftungsausschluss

Vivo Red Light Therapy übernimmt keinerlei Zusicherungen, Erklärungen oder Garantien hinsichtlich der Fähigkeit dieser Produkte, körperliche oder geistige Beschwerden zu heilen. Vor der Verwendung dieser Produkte sollte bei Beschwerden, die medizinische Aufmerksamkeit erfordern, stets eine qualifizierte medizinische Fachkraft konsultiert werden. Die Behandlungszeiten in dieser Übersicht sind lediglich allgemeine Richtwerte, aus Praktikabilitätsgründen gerundet, und eignen sich möglicherweise nicht für jede Person oder Situation.

Hinweis zur Nutzung der Inhalte

Dutch Health Store hat von VIVO Red Light Therapy die Erlaubnis erhalten, alle Textinhalte zur Erklärung und Bewerbung von VIVO Produkten zu verwenden. Die ursprünglichen VIVO Inhalte, Produktinformationen, Markenpositionierung und Dosierungsinformationen bleiben Eigentum von VIVO Red Light Therapy.

Kontakt: Constructieweg 90K, 3641 SP, Mijdrecht
 Telefon: 0297 893048
 E Mail: info@vivoredlighttherapy.com
 Webseite: www.vivoredlighttherapy.com