

APERÇU DES RECOMMANDATIONS DE DOSAGE

Durées de traitement, distances et Joules par appareil et par application

À propos de cet aperçu

Ce document indique la durée de traitement recommandée pour chaque appareil, en fonction de l'application (tissu superficiel ou profond) et de la distance à la peau. Pour chaque combinaison, une durée minimale, optimale et maximale est indiquée.

- Applications superficielles : amélioration de la peau, troubles cutanés, yeux ou plaies.
- Applications en profondeur : muscles, articulations, organes.
- Min : la durée de traitement minimale recommandée pour un effet sûr et perceptible.
- Optimal : la durée de traitement recommandée pour le meilleur résultat.
- Max : la durée de traitement la plus longue recommandée.

Sous chaque tableau, vous trouverez les Joules par application ainsi que la surface de traitement de l'appareil. Ces valeurs s'appliquent à toutes les distances au sein de cette application.

Remarque : les durées de traitement ci dessous sont arrondies à la minute la plus proche, afin de rester pratiques et faciles à utiliser. La thérapie par la lumière rouge ne nécessite pas d'être chronométrée à la seconde près. Utilisez ces durées comme une indication claire, augmentez progressivement, et écoutez votre corps.

BioPhoton 2.0 / 3.0

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~3 min	~13 min	~23 min
Tissu profond	0 cm	~15 min	~32 min	~50 min
Tissu profond	15 cm	~23 min	~50 min	~77 min

Joules : Superficiel 8 169 J | Profond 31 233 J | Surface de traitement : 961 cm²

BioPhoton Max Bi Tone

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~5 min	~9 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~6 min	~11 min
Superficiel	40 cm	~2 min	~7 min	~12 min
Superficiel	50 cm	~2 min	~7 min	~13 min
Tissu profond	0 cm	~2 min	~4 min	~7 min
Tissu profond	15 cm	~9 min	~20 min	~31 min
Tissu profond	30 cm	~11 min	~24 min	~37 min
Tissu profond	40 cm	~12 min	~25 min	~39 min
Tissu profond	50 cm	~13 min	~28 min	~43 min

Joules : Superficiel 20 196 J | Profond 77 220 J | Surface de traitement : 2376 cm²

Vivo Lux 450 S.2

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~2 min	~3 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~2 min	~4 min
Superficiel	40 cm	~1 min	~3 min	~5 min

Tissu profond	15 cm	~3 min	~7 min	~11 min
Tissu profond	30 cm	~4 min	~8 min	~13 min
Tissu profond	40 cm	~5 min	~10 min	~15 min

Joules : Superficiel 35 700 J | Profond 136 500 J | Surface de traitement : 4200 cm²

Vivo Lux 300 S.2

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~2 min	~3 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~2 min	~4 min
Superficiel	40 cm	~1 min	~3 min	~4 min
Tissu profond	15 cm	~3 min	~7 min	~11 min
Tissu profond	30 cm	~4 min	~8 min	~13 min
Tissu profond	40 cm	~4 min	~10 min	~15 min

Joules : Superficiel 23 460 J | Profond 89 700 J | Surface de traitement : 2760 cm²

Vivo Lux 150 S.2

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~2 min	~3 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~2 min	~4 min
Superficiel	40 cm	~1 min	~3 min	~5 min
Tissu profond	15 cm	~3 min	~7 min	~10 min
Tissu profond	30 cm	~4 min	~8 min	~13 min
Tissu profond	40 cm	~5 min	~10 min	~16 min

Joules : Superficiel 12 240 J | Profond 46 800 J | Surface de traitement : 1440 cm²

Vivo Lux 60 S.2

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~2 min	~4 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~4 min	~7 min
Superficiel	40 cm	~1 min	~6 min	~10 min
Tissu profond	15 cm	~4 min	~8 min	~13 min
Tissu profond	30 cm	~7 min	~15 min	~23 min
Tissu profond	40 cm	~10 min	~22 min	~33 min

Joules : Superficiel 5 177 J | Profond 19 793 J | Surface de traitement : 609 cm²

Vivo Lux 35 S.2

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	15 cm	~1 min	~2 min	~4 min
Superficiel	30 cm	~1 min	~5 min	~8 min
Superficiel	40 cm	~2 min	~7 min	~12 min

Tissu profond	15 cm	~4 min	~10 min	~15 min
Tissu profond	30 cm	~8 min	~18 min	~28 min
Tissu profond	40 cm	~12 min	~26 min	~40 min

Joules : Superficiel 2 125 J | Profond 8 125 J | Surface de traitement : 250 cm²

Vivo Red Light Cap 2.0

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	0 cm	~1 min	~4 min	~6 min
Tissu profond	0 cm	~6 min	~14 min	~21 min

Joules : Superficiel 3 009 J | Profond 11 505 J | Surface de traitement : 354 cm²

Vivo Torch 2.0

Application	Distance	Min	Optimal	Max
Superficiel	3 cm	~1 min	~2 min	~3 min
Superficiel	20 cm	~2 min	~8 min	~14 min
Tissu profond	0 cm	~2 min	~4 min	~6 min
Tissu profond	3 cm	~3 min	~7 min	~10 min
Tissu profond	20 cm	~14 min	~29 min	~45 min

Joules : Superficiel 77 J | Profond 293 J | Surface de traitement : 9 cm²

Applications spécifiques (Vivo Torch 2.0)

Plainte	Mode	Distance	Embout
Muscles / articulations	Mode 2	0 cm	Lentille lune
Oreille / dent (inflammation)	Mode 1	0 cm	Intra oral
Rhume des foins / sinus	Mode 2	0 cm	Intra oral

Ces réglages proviennent du manuel original et diffèrent du tableau de distances général ci dessus.

Clause de non responsabilité

Vivo Red Light Therapy ne fait aucune déclaration, allégation ni garantie quant à la capacité de ces produits à guérir une affection physique ou mentale. Un professionnel de santé qualifié doit toujours être consulté avant d'utiliser ces produits pour toute affection nécessitant une attention médicale. Les durées de traitement de cet aperçu sont uniquement des recommandations générales, arrondies à des fins pratiques, et peuvent ne pas convenir à chaque personne ou situation.

Avis d'utilisation du contenu

Dutch Health Store a reçu l'autorisation de VIVO Red Light Therapy d'utiliser l'ensemble du contenu textuel pour l'explication et la promotion des produits VIVO. Le contenu original de VIVO, les informations produit, le positionnement de marque et les informations de dosage restent la propriété de VIVO Red Light Therapy.

Contact : Constructieweg 90K, 3641 SP, Mijdrecht
Téléphone : 0297 893048
Email : info@vivoredlighttherapy.com
Site web : www.vivoredlighttherapy.com