

Doseringsadvies Overzicht

Behandeltijden, afstanden en Joules per apparaat en toepassing

Over dit overzicht

Dit document geeft per apparaat de geadviseerde behandeltime weer, afhankelijk van de toepassing (oppervlakkig of diepe weefsel) en de afstand tot de huid. Voor elke combinatie staat een minimale, optimale en maximale behandeltime vermeld.

Oppervlakkige toepassingen huidverbetering, huidklachten, ogen of wondjes.

Diepe weefseltoepassingen spieren, gewrichten, organen.

Min de kortste geadviseerde behandeltime voor een veilig en merkbaar effect.

Optimaal de aanbevolen behandeltime voor het beste resultaat.

Max de langste behandeltime die geadviseerd wordt.

Onder elke tabel staat het aantal Joules per toepassing en het behandeloppervlak van het apparaat. Deze waarden gelden voor alle afstanden binnen die toepassing.

BioPhoton 2.0 / 3.0

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	3m 5s	13m 7s	23m 9s
Diepe weefsel	0 cm	14m 53s	32m 15s	49m 36s
Diepe weefsel	15 cm	23m 9s	50m 9s	77m 10s

Joules: Oppervlakkig: 8.169 J | Diepe weefsel: 31.233 J | Behandeloppervlak: 961 cm2

BioPhoton Max Bi Tone

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	1m 13s	5m 11s	9m 9s
Oppervlakkig	30 cm	1m 28s	6m 13s	10m 58s
Oppervlakkig	40 cm	1m 34s	6m 39s	11m 44s
Oppervlakkig	50 cm	1m 44s	7m 23s	13m 1s
Diep	0 cm	1m 57s	4m 14s	6m 30s
Diep	15 cm	9m 9s	19m 50s	30m 32s
Diep	30 cm	10m 58s	23m 45s	36m 33s
Diep	40 cm	11m 44s	25m 26s	39m 7s

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Diep	50 cm	13m 1s	28m 13s	43m 24s

Joules: Oppervlakkig: 20.196 J | Diep: 77.220 J | Behandeloppervlak: 2376 cm2

Vivo Lux 450 S.2

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	0m 26s	1m 52s	3m 17s
Oppervlakkig	30 cm	0m 31s	2m 11s	3m 51s
Oppervlakkig	40 cm	0m 36s	2m 35s	4m 33s
Diepe weefsel	15 cm	3m 17s	7m 8s	10m 58s
Diepe weefsel	30 cm	3m 51s	8m 20s	12m 49s
Diepe weefsel	40 cm	4m 33s	9m 51s	15m 9s

Joules: Oppervlakkig: 35.700 J | Diepe weefsel: 136.500 J | Behandeloppervlak: 4200 cm2

Vivo Lux 300 S.2

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	0m 26s	1m 49s	3m 12s
Oppervlakkig	30 cm	0m 31s	2m 11s	3m 51s
Oppervlakkig	40 cm	0m 36s	2m 32s	4m 28s
Diepe weefsel	15 cm	3m 12s	6m 57s	10m 41s
Diepe weefsel	30 cm	3m 51s	8m 20s	12m 49s
Diepe weefsel	40 cm	4m 28s	9m 40s	14m 53s

Joules: Oppervlakkig: 23.460 J | Diepe weefsel: 89.700 J | Behandeloppervlak: 2760 cm2

Vivo Lux 150 S.2

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	0m 25s	1m 46s	3m 8s
Oppervlakkig	30 cm	0m 31s	2m 11s	3m 51s
Oppervlakkig	40 cm	0m 38s	2m 43s	4m 48s
Diepe weefsel	15 cm	3m 8s	6m 46s	10m 25s
Diepe weefsel	30 cm	3m 51s	8m 20s	12m 49s
Diepe weefsel	40 cm	4m 48s	10m 25s	16m 2s

Joules: Oppervlakkig: 12.240 J | Diepe weefsel: 46.800 J | Behandeloppervlak: 1440 cm2

Vivo Lux 60 S.2

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	0m 31s	2m 11s	3m 51s
Oppervlakkig	30 cm	0m 54s	3m 50s	6m 45s
Oppervlakkig	40 cm	1m 20s	5m 40s	10m 0s
Diep	15 cm	3m 51s	8m 20s	12m 49s
Diep	30 cm	6m 45s	14m 38s	22m 31s
Diep	40 cm	10m 0s	21m 40s	33m 20s

Joules: Oppervlakkig: 5.177 J | Diep: 19.793 J | Behandeloppervlak: 609 cm2

Vivo Lux 35 S.2

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	15 cm	0m 35s	2m 29s	4m 23s
Oppervlakkig	30 cm	1m 7s	4m 43s	8m 20s
Oppervlakkig	40 cm	1m 35s	6m 45s	11m 54s
Diep	15 cm	4m 23s	9m 30s	14m 37s
Diep	30 cm	8m 20s	18m 3s	27m 47s
Diep	40 cm	11m 54s	25m 48s	39m 41s

Joules: Oppervlakkig: 2.125 J | Diep: 8.125 J | Behandeloppervlak: 250 cm2

Vivo Red Light Cap 2.0

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	0 cm	0m 51s	3m 38s	6m 25s
Diep	0 cm	6m 25s	13m 54s	21m 24s

Joules: Oppervlakkig: 3.009 J | Diep: 11.505 J | Behandeloppervlak: 354 cm2

Vivo Torch 2.0

Toepassing	Afstand	Min	Optimaal	Max
Oppervlakkig	3 cm	0m 24s	1m 44s	3m 3s
Oppervlakkig	20 cm	1m 48s	7m 41s	13m 33s
Diep	0 cm	1m 41s	3m 40s	5m 38s
Diep	3 cm	3m 3s	6m 36s	10m 9s
Diep	20 cm	13m 33s	29m 22s	45m 10s

Joules: Oppervlakkig: 77 J | Diep: 293 J | Behandeloppervlak: 9 cm2